



ZAFE Care Systems AB  
Karlgatan 38  
291 59 Kristianstad  
Tel: 044 – 28 27 50 Fax: 044 – 780 95 50  
[www.zafe.se](http://www.zafe.se) info@zafe.se

## Bruksanvisning Sittlarm



Sittlarmet huvudsakliga uppgift är att bevaka så att en person som sitter i en stol eller rullstol inte reser sig upp. Sittlarmet fästes lättast med dubbelhäftande tejp eller kardborre på stolen.

Genom att fästa magneten i brukarens kläder och se till så man får önskad längd på snöret beroende på hur snabbt larm man vill ha, skickas det ett larm när brukaren försöker att resa på dig.

### Hur kopplar man sittlarmet mot en mottagare?

Genom att ställa mottagaren i sitt programmeringsläge aktiverar du sittlarmet genom att dra i snöret. (en röd lysdiod tänds) Därefter väljer du önskad text i mottagaren så som t.ex. Sittlarm eller liknande.