



	Dokumentnamn/Document name	Info klass/Info class	Sida/Page
	Felsökningsinstruktion	Publik	1 av 1
Godkänd/Approved by	Säng / EP-larm	Utgåva/Issue	Utfärdare/Issued by
Anders Björkman	Datum/Date	3	Anja Åberg
	2011-04-01		

FELSÖKA SÄNG- / EP-LARM MED INKA OCH MOTTAGARE

- Kontrollera att alla kablar är hela
- Blinkar ingen lampa på kontrollenheten. Kontrollera om enheten är i läge ON, håll in den lilla on/off-knappen några sekunder. Den sitter längst till höger där man kopplar in nätadaptern och sensorn
- Är sändare INKA i läge ON
- Är anslutningskabeln mellan INKA och kontrollenheten rätt isatt. Ta ur och sätt i igen. Röd ska vara i IN på INKA och gul ska sitta i AUX-ingången i kontrollenheten.
- Öppna kontrollenheten, ta ur ev batterier och dra ur strömkabeln, sätt sedan dip 7 och 8 neråt, nu är ljudet på. "Dra" igång larmet, fungerar det så kommer det nu att tjuta i kontrollenheten (Med dip 7 och 8 ändrar man el stänger av volymen)
- Kontrollera nu om säng- / ep-larmet är inlagt i Homen/Trexen. Pil ner i menyn till programmering / tryck OK / lägg till sändare / OK. Står nu aktivera sändare i displayen. "Dra" igång larmet igen. Var det INTE inlagt kommer det att pipa i mottagaren och du får lägga in det igen. Alltså leta upp texten du vill ha, bekräfta med OK-knappen osv
- Tar inte mottagaren emot larmet. Kolla INKA. Skruva av locket, byt batteri, tryck på den lilla vita knappen i högra hörnet för att se om INKA sänder (det kommer blinka rött strax ovanför). Gör den det, prova igen att programmera in den mot mottagaren, men genom att trycka här när ni ska aktivera sändaren