

Bruksanvisning för Rörelsevakt Relä



Rörelsevaktens funktion

Rörelsevakten är avsedd att kopplas till befintliga system.

Rörelsevakten reagerar på rörelser, t.ex människa eller djur. I bruksanvisningen kommer vi att ge er tips och råd om hur ni skall placera larmet.

Rörelsevakten har ett batteri med en livslängd på ca 1 år. Vid batteribyte och installation måste larmet öppnas.

Rörelsevakten fungerar så att den larmar direkt vid rörelse. Sedan är den inaktiv i 2-3 minuter. Om det fortfarande är rörelse framför den efter den tiden kommer det att gå ett nytt larm.

Placering

Rörelsevakten placeras normalt stående på golvet vid ett sängben. Den känner då av ett fält som är 90 grader i horisontalplanet och med en "höjd" av ca 15 centimeter över golvet. Om sängen står så placerad att personen kan gå ur sängen på båda sidor måste rörelsevakten placeras så att avkänningsområdet täcker denna situation.



Anslutning

Rörelsevakten är försedd med en sladd och en kontakt (6,3 mm teleplugg hane) för anslutning till befintligt larmsystem. Kontakten sätts i uttaget för ringledningssystemet. Om kontakten ej passar, kontakta Zafe för konsultation. VIKTIGT! Du behöver vänta minst 2-3 minuter efter att kontakten satts i, innan rörelsevakten fungerar.

A. Batteri

Batteriet är ett 9-volts Alkalinebatteri typ 6LR61 och skall bytas var 10:e månad. Byte av batteri görs genom att lossa bottenplattan med en skruvmejsel. Batteriet blir då lätt åtkomligt. Använd alltid Alkalinebatteri!


OBS! Efter batteribyte måste elektroniken stabilisera sig, detta tar 8-10 minuter.

B. Räckvidd och täckning


Vid leverans har Rörelsevakten ett avkänningsområde som är ca 90 grader i horisontalplanet. Avkänningsområdets "längd" är normalt 5-11 meter.

SIDE VIEW

NORMAL (Multi-Level) AREA

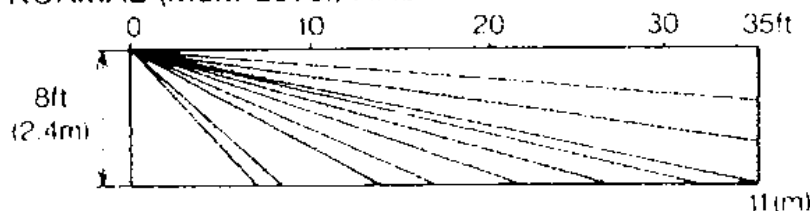

TOP VIEW

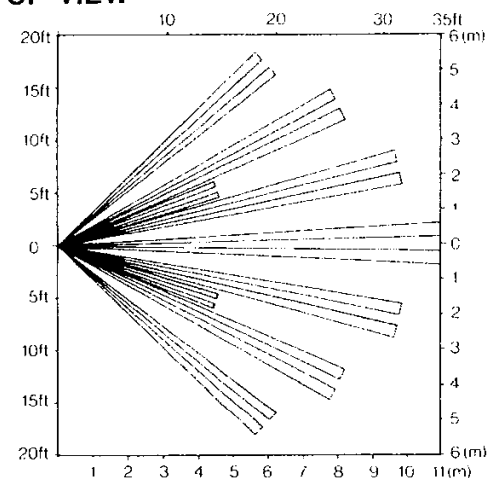

Adress
ZAFE Care Systems AB
Bockebäcksvägen 23
291 73 Önnestad

Hemsida/e-post

Hemsida: www.zafe.se
e-post: info@zafe.se


Telefon

Förs. +46 10 209 62 10
Service. +46 10 209 62 20
Fax. +46 44 780 95 50


C. Test

På kretskortet finns några olika inställningsmöjligheter.

1. **NORMAL/WALK TEST.** För att testa Rörelsevaktens avkänningsområde kan en bygel flyttas till resp läge.
I läge "WALK TEST" är fördröjningstiden helt bortkopplad och man kan kontrollera avkänningsområdets storlek genom att iakttä den röda lysdioden; tänd = larm.
Kontakten behöver inte sitta i utan det räcker som regel att se på lysdioden.
"NORMAL" är driftläge - 2 minuter fördröjning inkopplad.

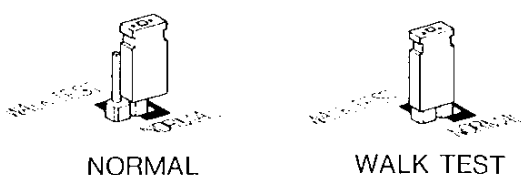

2. **PULSER.** Rörelsevaktens "känslighetsinställning" 2=högsta och 4=lägsta. En bygel kan flyttas i 2 olika positioner och betyder att Rörelsevakten kan ställas för att reagera på en eller flera rörelser inom avkänningsområdet. Normalläge är 4.
3. **LINSENS UPPTAGNINGSSOMRÅDE.** Denna funktion reglerar Rörelsevaktens "räckvidd"
Genom att lossa linsen och rotera den 180° kan man välja långsmalt upptagningsområde istället för vidvinkel. När W pekar neråt blir upptagningsområdet vidvinkel.

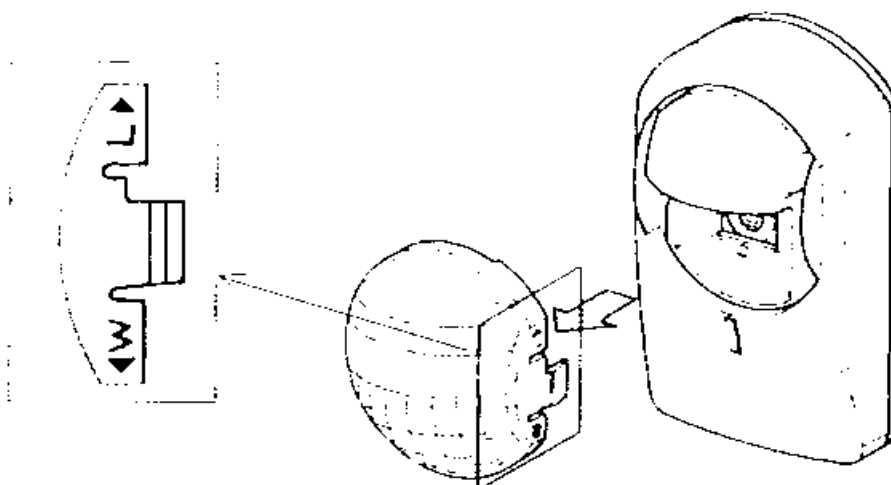

Önnestad 2015-02-04

